



Das nicht abrasive, schonende Pflegesystem für alle gängigen formstabilen gasdurchlässigen Contactlinsen

Konzeption

Die ideale Abstimmung der Lösungen „Reinigen R“, und „Spülen S“ ergibt eine schonende Pflege und einen optimalen Tragekomfort der Contactlinsen.

Contopharma „Reinigen R“



Contopharma „Reinigen R“ ist das Resultat einer längeren Entwicklung¹ auf der Suche nach einer nicht abrasiven (zur Schonung der Linsen), tensidhaltigen Formulierung mit hoher Reinigungskraft ohne übermässige Reizungen bei direktem Augenkontakt. Contopharma „Reinigen R“ ist frei von schwermetallhaltigen Desinfektionsstoffen.



Verunreinigungen vor und nach der Reinigung. Links: mit blauem Farbstoff sichtbar gemachte Verunreinigungen. Rechts: Mit üblichem Handelsprodukt gereinigte Linse. Mitte: Mit Lösung „Reinigen R“ behandelte Linse¹.

Contopharma „Spülen S“

Contopharma „Spülen S“ ist eine polyfunktionelle Spül- und Aufbewahrungslösung für formstabile gasdurchlässige Contactlinsen. Sie hält die Linse im hydratisierten, isotonischen Zustand und hemmt das Wachstum kontaminierender Mikroorganismen, ohne Anreicherung des schleimhautverträglichen Konservierungsmittels auf der Oberfläche der Contactlinsen. Eine spezielle Mischung kombinierter Polymere („antisoiling agent“) hydrophilisiert die Contactlinse zur Optimierung des Tragekomforts, erleichtert den Reinigungsprozess („antisoiling effect“) und verhindert weitgehend Anlagerungen von Verunreinigungen, wobei sekundäre Immunreaktionen (Augenrötungen, GPC u. ä.) minimiert werden.

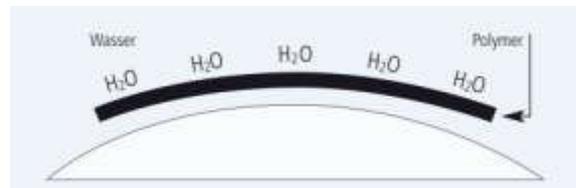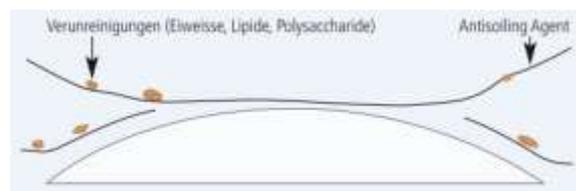

Weitere Hinweise

Zur Nachbenetzung werden die CONTOPHARMA Comfort-Lösungen empfohlen. Durch die Lösung „drop&see“ werden bei geringer Tränenmenge durch die Ausgewogenheit der Wirkstoffe die Zellfunktionen der Hornhaut unterstützt. Mit der Lösung „lens&lid“ werden durch die optimierte Zusammensetzung die CL-Oberflächen vor Verunreinigungen während des Tragens geschützt.

¹data on file: Contopharma AG, Interlaken