




Ένας βιοσυμβατός φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης με 54% περιεκτικότητα νερού, ένας νέος σχεδιασμός φακών επαφής με δίκοιλη οπίσθια επιφάνεια και ενσωματωμένη UV προστασία.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ

Με το νέο και ειδικά ανεκτικό υλικό "Vitafilcon A" των φακών "Contaview premium UV" επιτύχαμε την δημιουργία ενός μηνιαίου φακού επαφής απολυτά βιοσύμβατου.

Προκειμένου να αναπαράγουμε τις θετικές ιδιότητες του ανθρώπινου κερατοειδή χιτώνα σε ένα υλικό φακών επαφής, ουσίες συγγενικές με εκείνες του ανθρώπινου σώματος, ενσωματώθηκαν σε ένα σύνθετο πολυμερές συστατικό καθιστώντας τον **"Contaview premium UV"** έναν ιδιαίτερα ανεκτικό φακό επαφής.

Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και στις άριστες ιδιότητες ύφανσης, ο συγκεκριμένος φακός συνιστάται επίσης για ευαίσθητα και ξηρά μάτια.

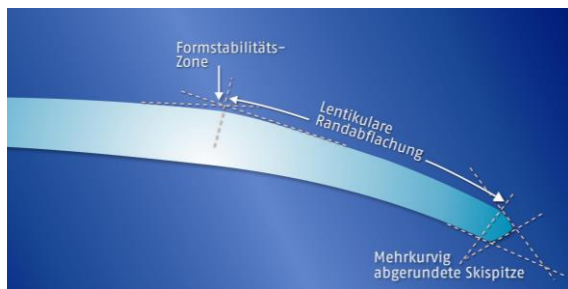

Λόγω της ειδικά σχεδιασμένης ζώνης σταθερότητας στη μεταβολή της οξύτητας, ο χειρισμός των φακών "Contaview premium UV" έχει γίνει σημαντικά ευκολότερος.

Η σημαντική αυτογενής και μακροπρόθεσμη ανεκτικότητα των φακών έγινε πρωτίστως, λόγω του νέου ανεπτυγμένου σχεδιασμού των άκρων του φακού. Κατά το βλεφαρισμό αναπτύσσεται μία πολύ απαλή αλληλεπίδραση μεταξύ βλεφάρων και φακών, παρέχοντας επομένως άριστη άνεση κατά τη διάρκεια χρήσης των φακών.

Το υλικό "Vitafilcon A", το οποίο χρησιμοποιείται, παρέχει προστασία UV, προσφέροντας κατά συνέπεια επιπλέον προστασία έναντι στην επιβλαβή ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υλικό FDA, ομάδα IV	Vitafilcon A (46%)
(φίλτρο UV, μη ιονικό)	
Απόχρωση:	Απαλό πράσινο
Μέθοδος κατασκευής:	Σχηματοποίηση (με καλούπι)
Περιεκτικότητα σε νερό:	54%
Πρόσθια επιφάνεια:	Σφαιρική πολλαπλών καμπυλών
Οπίσθια επιφάνεια:	Σφαιρική δίκοιλη
Κεντρικό πάχος (στις -3.00 dpt):	0.09mm
Διαπερατότητα οξυγόνου (Dk/L):	22
Διάμετρος Οπτικής Ζώνης:	≥ 8.50mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο φακός επαφής θα πρέπει να εφαρμόζεται κεντρικά στον οφθαλμό, να κινείται και να 'γλιστρά' ελαφρά κατά τον βλεφαρισμό καθώς και τις αντανάκλαστικές κινήσεις των ματιών, ακόμα και ύστερα από τέσσερις ώρες χρήσης.

Επιπρόσθετα κριτήρια ακολουθούν:

- Οποιαδήποτε πιθανή πίεση των άκρων του φακού στον ιστό του επιπεφυκότα θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Σταθερή Οπτική Οξύτητα.
- Καμιά φυσαλίδα αέρος δεν πρέπει να εμφανίζεται κάτω από το φακό κατά την εφαρμογή στον οφθαλμό.
- Τα άκρα των φακών δε θα πρέπει να ανασηκώνονται από την επιφάνεια του ματιού σε καμία κατεύθυνση του βλέμματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ

Για τη φροντίδα των φακών "CONTAVIEW PREMIUM UV" τα υγρά της CONTOPHARMA "simply-one" ως λύση άνεσης ή το σύστημα υπεροξειδίου με το διάλυμα και τις αντίστοιχες ταμπλέτες "tab in one" μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τα διαλύματα της CONTOPHARMA είναι εξαιρετικά κατάλληλα για εφύγρανση των φακών επαφής. Το διάλυμα "drop & see" κατάλληλο για περιπτώσεις μειωμένης παραγωγής δακρύων, υποστηρίζει τις κυτταρικές λειτουργίες του κερατοειδή χιτώνα, ισορροπώντας τα ενεργά συστατικά του. Με το διάλυμα "Lens & Lid" η επιφάνεια των φακών επαφής προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες μόλυνσης κατά τη διάρκεια χρήσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Φ.Ε.

Μηνιαία αντικατάσταση συνιστάται για τους "CONTAVIEW PREMIUM UV" φακούς επαφής της CONTOPHARMA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι φακοί επαφής που απορροφούν ακτινοβολία UV δεν αποτελούν αντικατάσταση των φακών που προορίζονται για άλλες οπτικές ανάγκες, όπως οι διορθωτικοί φακοί ή τα γυαλιά ηλίου, τα οποία παρέχουν επίσης UV προστασία. Ο χρήστης θα πρέπει να προστατεύεται περαιτέρω από την ακτινοβολία χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι ποιο σημείο οι φακοί επαφής που απορροφούν UV ακτινοβολία μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα οφθαλμικών αλλαγών που προκαλούνται από τη UV ακτινοβολία.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

Διάμετρος	mm	14.20
Βασική Καμπυλότητα	mm	(-) 8.60 / 8.90, (+) 8.80
Διάμετρος	mm	13.60
Βασική Καμπυλότητα	mm	(+)(-)8.30

Κλίμακα Διοπτριών

Μυωπικοί:	διοπτρίες	sph -0.25 to -6.00 (gradation in 0.25 dpt)
	διοπτρίες	sph -6.00 to -12.00 (gradation in 0.50 dpt)
Υπερμετρωπικοί:	διοπτρίες	sph +0.25 to +5.00 (gradation in 0.25 dpt)
	διοπτρίες	sph +5.00 to +8.00 (gradation in 0.50 dpt)

Συσκευασία: πακέτο των έξι φακών επαφής (blisters)