




Ένας βιοσυμβατός φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης με 54% περιεκτικότητα νερού, ένας νέος σχεδιασμός με ενσωματωμένη UV προστασία.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ

Με το νέο και ιδιαίτερα βιοσυμβατό υλικό "VitaFilcon A" των φακών "CONTAVIEW premium toric UV" επιτύχαμε τη δημιουργία ενός μηνιαίου φακού επαφής απόλυτα βιοσυμβατού.

Προκειμένου να αναπαράγουμε τις θετικές ιδιότητες του ανθρώπινου κερατοειδή χιτώνα σε ένα υλικό φακών επαφής, ουσίες συγγενικές με εκείνες του ανθρώπινου σώματος ενσωματώθηκαν σε ένα σύνθετο πολυμερές συστατικό, καθιστώντας τους "CONTAVIEW premium toric UV" έναν ιδιαίτερα ανεκτό φακό επαφής.

Ειδικότερα χάρη της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό και τις άριστες ιδιότητες ύγρανσης, ο συγκεκριμένος φακός συνίσταται επίσης και για περιπτώσεις οφθαλμικής ευαισθησίας και ξηροφθαλμίας.

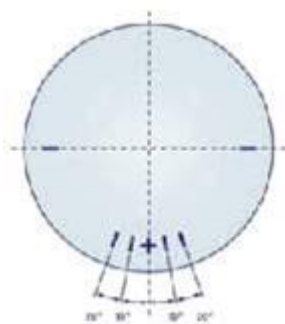

Λόγω της ειδικά σχεδιασμένης ζώνης σταθερότητας στη μεταβολή της οξύτητας, ο χειρισμός των φακών "CONTAVIEW premium toric UV" έχει γίνει σημαντικά ευκολότερος.

Η σημαντική αυτογενής και μακροπρόθεσμη ανεκτικότητα των φακών έγινε πρωτίστως λόγω του νέου ανεπτυγμένου σχεδιασμού των ακρών του φακού. Κατά το βλεφαρισμό αναπτύσσεται μια πολύ απαλή αλληλεπίδραση μεταξύ βλεφάρων και φακών, παρέχοντας επομένως άριστη άνεση κατά τη διάρκεια χρήσης των φακών.

Αυτή η νέα κατασκευή torικών φακών επαφής με δυναμική σταθεροποίηση καθιστά μια γρήγορη και σταθερή ρύθμιση για το φακό επαφής καθώς και λόγω της ισορροπημένης γεωμετρίας του φακού υψηλή και άμεση ανεκτικότητα.

Ο φακός επαφής "CONTAVIEW premium toric UV" χρησιμοποιείται για τη διόρθωση αστιγματικών αμετροπικών καταστάσεων όρασης, στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας τυποποιημένος φακός επαφής.

Το υλικό "VitaFilcon A" το οποίο χρησιμοποιείται, παρέχει προστασία UV, προσφέροντας κατά συνέπεια επιπλέον προστασία έναντι στην επιβλαβή ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV, μη ιονικό)	VitaFilcon A (46%)
Απόχρωση:	Ανοιχτό πράσινο
Μέθοδος κατασκευής:	Με καλούπτι
Περιεκτικότητα σε νερό:	54%
Οπίσθια επιφάνεια:	Τορική
Κεντρικό πάχος (στις -3.00 dpt):	0.09mm
Διαπερατότητα οξυγόνου (Dk/L):	22
Οπτικής Ζώνη:	> 9.00mm
Σταθεροποίηση :	δύναμη ελευθέρου πρίσματος
Σημείο μακαρισμού του άξονα:	κάτω με 270°

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύμφωνα με την τοποθέτηση ενός σφαιρικού φακού "CONTAVIEW premium UV" η αξιολόγηση των παραμέτρων μπορεί να καθοριστεί από μια περαιτέρω οπτομέτρηση με τους πρώτους διαγνωστικούς φακούς.

Υπάρχει δυνατότητα αρχικού torικού μηνιαίου φακού "CONTAVIEW premium toric UV", είτε από το δοκιμαστικό σετ είτε ως διαγνωστικό φακό επαφής, προκειμένου να καθοριστεί η σταθεροποίηση και η συνταγή των φακών επαφής από την περαιτέρω οπτομέτρηση.

Ο φακός επαφής θα πρέπει να εφαρμόζεται κεντρικά στον οφθαλμό, να κινείται και να 'γλιστρά' ελαφρά κατά τον βλεφαρισμό καθώς και τις αντανάκλαστικές κινήσεις των ματιών, ακόμα και ύστερα από τέσσερις ώρες χρήσης.

Επιπρόσθετα κριτήρια ακολουθούν:

- Οποιαδήποτε πιθανή πίεση των άκρων του φακού στον ιστό του επιπεφυκότα θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Σταθερή Οπτική Οξύτητα.
- Καμιά φυσαλίδα αέρος δεν πρέπει να εμφανίζεται κάτω από το φακό κατά την εφαρμογή στον οφθαλμό.
- Τα άκρα των φακών δε θα πρέπει να ανασκλώνονται από την επιφάνεια του ματιού σε καμία κατεύθυνση του βλέμματος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ

Για τη φροντίδα των φακών "CONTAVIEW premium toric UV" τα υγρά της CONTOPHARMA "simply-one" ως λύση άνεσης ή το σύστημα υπεροξειδίου με το διάλυμα και τις αντίστοιχες ταμπλέτες "tab in one" μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τα διαλύματα της CONTOPHARMA είναι εξαιρετικά κατάλληλα για εφύγρυνση των φακών επαφής. Το διάλυμα "drop & see" κατάλληλο για περιπτώσεις μειωμένης παραγωγής δακρύων, υποστηρίζει τις κυτταρικές λειτουργίες του κερατοειδή χιτώνα, ισορροπώντας τα ενεργά συστατικά του. Με το διάλυμα "Lens & Lid" η επιφάνεια των φακών επαφής προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες μόλυνσης κατά τη διάρκεια χρήσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Φ.Ε.

Μηνιαία αντικατάσταση συνιστάται για τους "CONTAVIEW premium toric UV" φακούς επαφής της CONTOPHARMA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι φακοί επαφής που απορροφούν ακτινοβολία UV δεν αποτελούν αντικατάσταση των φακών που προορίζονται για άλλες οπτικές ανάγκες, όπως οι διορθωτικοί φακοί ή τα γυαλιά ηλίου, τα οποία παρέχουν επίσης UV προστασία. Ο χρήστης θα πρέπει να προστατεύεται περαιτέρω από την ακτινοβολία χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι ποιο σημείο οι φακοί επαφής που απορροφούν UV ακτινοβολία μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα οφθαλμικών αλλαγών που προκαλούνται από τη UV ακτινοβολία.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

Διάμετρος	mm	14.40
Βασική Καμπυλότητα	mm	μεσαία καμπυλότητα

Κλίμακα Διοπτριών

Μυωπικοί: διοπτρίες sph -0.25 to -8.00
(διαβάθμιση ανα 0.25 διοπτρίες)

Υπερμετρωπικοί: διοπτρίες sph +0.25 to +4.00
(διαβάθμιση ανα 0.25 διοπτρίες)

Κύλινδρος: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 , -2.75

Αξονας: 0° έως 180°
(διαβάθμιση ανά 10°)

Συσκευασία: πακέτο των έξι φακών επαφής (blisters)